

# CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS PROTECTORAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Fabricadas en material plástico transparente. ♻️

**PANTALLA 1** Consta de 3 piezas, zona **PANTALLA**, zona **SUJECIÓN** a la cabeza regulable y **ESPUMA ADHESIVA** para apoyo en frente y tener mayor comodidad de uso. **Montaje:** se une la pantalla a la cinta de sujeción mediante dos trabillas de lengüeta doble, después se pega la espuma a la altura de las lengüetas en la cara interior de la pantalla de forma que la cinta de sujeción vaya por el lado exterior de la pantalla. De esta forma nos permite acoplar mejor a la frente y por último se fija la regulación de la cinta a la cabeza.

Las **pantallas protectoras** son lo suficientemente grandes como para cubrir bien los rostros de la mayoría de las personas, si en algún caso (un niño/a o persona menuda) fueran excesivamente grandes, se pueden recortar con mucha facilidad lo que crean conveniente. Aconsejamos preferiblemente tener que cortar dos veces antes que cortar demasiado.

Las pantallas protectoras son una barrera física, no están esterilizadas, son lavables, reutilizables y reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles. No se pueden poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma.

Las pantallas protectoras no son un juguete, sirven para protegerse de salpicaduras sanitarias o de otra índole.

Instrucciones de montaje:

