

CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS PROTECTORAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Fabricadas en material plástico transparente. ♻️

PANTALLA 2 Consta de 2 piezas, la **PANTALLA** y la **GOMA**. **Montaje:** la pantalla en la zona superior, tiene como unos picos de corona con dos tiras de hendidos para doblar el material en esas zonas en ángulo recto, consiguiendo así unos apoyos para la frente cuando nos la colocamos.

Lleva **3 agujeros** dispuestos en vertical a cada lado con varias funciones:

- 1.** Sujetar la goma, que para una mayor comodidad, la entraremos de fuera hacia adentro consiguiendo así que al colocárnosla quede un poco más cerrada la pantalla y se acople mejor a la cara.
- 2.** Regular la altura de la goma según el rostro del usuario, hay 3 niveles.
- 3.** Alargar o acortar la longitud de la goma a comodidad del usuario. Si se pasa solo por un agujero queda en su mayor longitud, pasándola por uno o varios agujeros más se acorta su longitud.

Las **pantallas protectoras** son lo suficientemente grandes como para cubrir bien los rostros de la mayoría de las personas, si en algún caso (un niño/a o persona menuda) fueran excesivamente grandes, se pueden recortar con mucha facilidad lo que crean conveniente. Aconsejamos preferiblemente tener que cortar dos veces antes que cortar demasiado.

Las pantallas protectoras son una barrera física, no están esterilizadas, son lavables, reutilizables y reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles. No se pueden poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma.

Las pantallas protectoras no son un juguete, sirven para protegerse de salpicaduras sanitarias o de otra índole.

Instrucciones de montaje:

