

CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS PROTECTORAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Fabricadas en material plástico transparente. ♻️


PANTALLA 3 Consta de 2 piezas, la **PANTALLA** y la **GOMA**. **Montaje:** la pantalla en su zona superior tiene dos hendidos de media luna, doblarlos un poco para darles forma. A continuación se introducen las dos flechas en las ranuras, de forma que las flechas montan sobre la zona de las ranuras. Una vez introducidas, hacer coincidir los dos agujeros y pasar la goma de fuera hacia dentro, primero por los dos agujeros de abajo y después, de dentro a fuera por los de arriba. Repetir la operación en el otro lado. La solapa pequeña para la frente puede estar hacia arriba o hacia abajo, el usuario puede estar más cómodo en una u otra posición.

Las **pantallas protectoras** son lo suficientemente grandes como para cubrir bien los rostros de la mayoría de las personas, si en algún caso (un niño/a o persona menuda) fueran excesivamente grandes, se pueden recortar con mucha facilidad lo que crean conveniente. Aconsejamos preferiblemente tener que cortar dos veces antes que cortar demasiado.


Las pantallas protectoras son una barrera física, no están esterilizadas, son lavables, reutilizables y reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles. No se pueden poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma.

Las pantallas protectoras no son un juguete, sirven para protegerse de salpicaduras sanitarias o de otra índole.


Instrucciones de montaje:

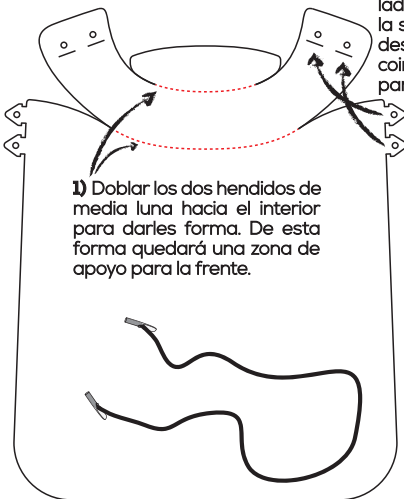

2) Introducir las dos flechas del mismo lado en las ranuras de la solapa pasándolas desde arriba y hacer coincidir los agujeros para pasar la goma.

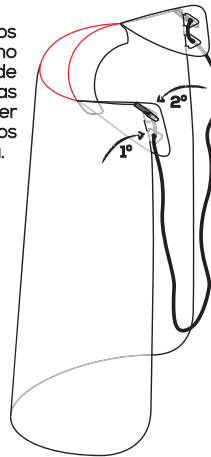

3) Pasar la goma primero por la flecha de abajo de fuera hacia dentro. Después en la flecha de arriba pasarla de dentro hacia fuera. Repetir en el otro lado de la pantalla.

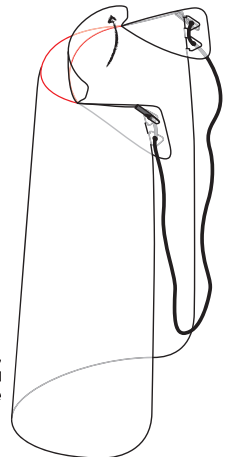

4) La solapa pequeña que apoya en la frente, puede estar hacia arriba o hacia abajo, según o más cómodo el usuario.