

CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS PROTECTORAS E INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Fabricadas en material plástico transparente. ♻️

PANTALLA 4 Es abatible. Consta de 4 piezas, la **PANTALLA**, la **CINTA de SUJECCIÓN** para la cabeza, la **SUJECCIÓN FRONTAL** y los **REMACHES**. **Montaje:**

1. Despejar todos los agujeros de las 3 piezas.
2. Cogemos las dos cintas de sujeción, y metemos SOLO de un lado el cuadradito saliente en la ranura de la cinta de sujeción, des de el interior hacia el exterior.
3. Después sujetando con la mano las cintas ponemos la pantalla en la parte de abajo de estas quedando de este orden: abajo la pantalla, en medio el cuadradito y encima la cinta y hacemos coincidir los 3 agujeros.
4. Cogemos el remache del pitoncito y lo colocamos des de la parte superior, haciéndolo pasar por los 3 agujeros. Por el otro lado le colocamos el remache del agujero y presionamos fuerte para su cierre.
5. Una vez fijado un lado, repetimos la operación en el otro lado.
6. Por último se ajusta la regulación de la cinta de sujeción a la cabeza.

Las **pantallas protectoras** son lo suficientemente grandes como para cubrir bien los rostros de la mayoría de las personas, si en algún caso (un niño/a o persona menuda) fueran excesivamente grandes, se pueden recortar con mucha facilidad lo que crean conveniente. Aconsejamos preferiblemente tener que cortar dos veces antes que cortar demasiado.

Las pantallas protectoras son una barrera física, no están esterilizadas, son lavables, reutilizables y reciclables, se pueden desinfectar, lavar con agua y jabón, con alcohol, lejía, etc. sin afectarles. No se pueden poner en el lavavajillas ni en la lavadora, el agua a alta temperatura puede afectar su forma.

Las pantallas protectoras no son un juguete, sirven para protegerse de salpicaduras sanitarias o de otra índole.

Instrucciones de montaje:

